

# ASEPTIL

## LINGETTES POUR ANTISEPTIE DES MAINS ET LA DESINFECTION DES OBJETS

### AVANTAGES

Lingettes imprégnées d'une solution antiseptique et désinfectante.

### UTILISATIONS

Pour l'antiseptie des mains et la désinfection des objets, des surfaces et des dispositifs médicaux en milieu médical.

*L'utilisation des lingettes ne dispense pas du protocole de lavage hygiénique et chirurgical des mains, avec un savon antiseptique.*

Les lingettes permettent de désinfecter la plupart des ustensiles personnels (thermomètre, pinces à ongles, rasoirs, ciseaux, ...)

Les lingettes s'utilisent en voyage, en voiture, en avion, au bureau, à la maison, ...

L'utilisation des lingettes ne dispense pas du protocole de nettoyage, préalable à toute désinfection.

L'utilisation des lingettes ne dispense pas du protocole de stérilisation des instruments pouvant être stérilisés par un procédé approprié.

### PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES DE LA SOLUTION D'IMPREGNATION

**Bactéricidie :** EN 1040 (5 mn)  
EN 1040 (1 mn, SARM)  
EN 1276 (5 mn)  
EN 13727 (5 mn, conditions de propreté)  
selon le protocole de la norme européenne NF EN 1500, réduction de 99,8%  
(1 mn, *Escherichia coli*)

**Fongicidie :** EN 1275 (*Candida albicans*, 5 mn)  
EN 13624 (*Candida albicans*, 5 mn, conditions de propreté)  
EN 1650 (*Candida albicans*, 15 mn, conditions de propreté)

**Virucidie :** Actif sur *Rotavirus* selon la méthodologie de la norme NF T 72-180 (5 mn)  
Actif sur *Parainfluenza 3* (paramyxovirus/virus humain) selon la méthodologie de la norme NF T 72-180 (15 mn)  
Actif sur *H5N1* (virus de la grippe aviaire)  
Actif sur *H1N1* selon la méthodologie de la norme EN 14476 + A1 en 30 sec  
Actif sur *herpès virus* selon la méthodologie de la norme NF T 72-180  
Actif sur *HIV* selon la norme NF T 72-180 en 30 sec  
Actif sur *PRV* (virus modèle Hépatite B) selon le protocole de la norme NF T 72-180 en 30 sec

### MODE D'EMPLOI

Tirer HORIZONTALEMENT une lingette imprégnée jusqu'à la pré découpe. Séparer d'un coup sec. Si la lingette suivante n'avait pas amorcé la sortie, ouvrir le conditionnement et réamorcer par la lingette du centre du rouleau. **Bien refermer le conditionnement après usage, pour éviter le dessèchement des lingettes.**

**Frotter la surface ou les mains à l'aide de la lingette**, sans oublier les espaces interdigitaux, le pourtour des ongles, les poignets et la pulpe des doigts, **pendant au moins 30 secondes. Ne pas rincer, laisser sécher à l'air libre.**

Jeter les lingettes usagées dans un conteneur à déchets.

# ASEPTIL

## (Suite)

### CARACTERISTIQUES

<i>Aspect</i>	: <i>liquide limpide</i>
<i>Odeur</i>	: <i>mentholée</i>
<i>Point éclair</i>	: <i>+ 62,5°C</i>
<i>Solubilité</i>	: <i>totalemment soluble dans l'eau</i>
<i>Principaux composants</i>	: <i>aqua, alcool denat. CAS 64-17-5 (47 mg/g), propylène glycol, myristalkonium chloride CAS 139-08-2 (3 mg/g), menthol, chlorhexidine digluconate CAS 18 472-51-0 (1,2 mg/g)</i>
<i>Non tissé</i>	: <i>viscose/cellulose</i>

### RAPPEL

Tous les agents à visée antiseptique et désinfectante ne sont pas stérilisants. Ils réduisent le nombre des microorganismes.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Ce produit est réservé à l'usage externe, sur peau saine exclusivement.

Ce produit est réservé à l'usage des objets et petits matériels ne présentant pas de rugosité et n'étant pas en contact avec les denrées alimentaires.

**Ne convient pas aux enfants de moins de 30 mois.**

### ESSAIS DE TOLERANCE

La solution a été formulée pour minimiser les risques allergiques.

### COMPATIBILITES

Le produit est compatible avec la plupart des matériaux, sauf plexiglas : procéder à un essai préalable.

### INCOMPATIBILITES

**Ne pas utiliser avec d'autres antiseptiques et autres produits.**

L'emploi simultané ou successif d'antiseptiques est à éviter sauf avec d'autres composés cationiques.

### CONSERVATION

Avant ouverture de la boîte, les lingettes se conservent 30 mois à l'abri de la chaleur, dans les conditions normales de températures.

Vérifier la date limite d'utilisation figurant sur le contenant.

Dès ouverture de la boîte, utiliser dans le mois.

### AUTRES INFORMATIONS

Les informations que ce document contient correspondent à l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné et n'ont d'autre but que de renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application.

Ces informations sont conformes à la législation en vigueur et sont données de bonne foi.

Elles ne sauraient donc constituer un engagement de notre part sur les propriétés précises de ces produits ou leur application à une utilisation déterminée.

L'attention des utilisateurs est donc tout particulièrement attirée sur les risques éventuels encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que celui pour lequel il est prévu.